

Smart Box
聪|明|盒



打开手机微信扫一扫
关注聪明盒官方微信

厦门初瑶科技有限公司

Xiamen Amoys Technology Co.Ltd

地址：福建省厦门市集美区杏林湾运营中心 1 号 1606


邮编：361001

网址：www.smartbox.com.cn

委托生产：厦门斯坦瑞科技有限公司

生产地址：厦门市集美区白虎岩路 19 号 203 单元之四

执行标准：Q/CY06001-2022

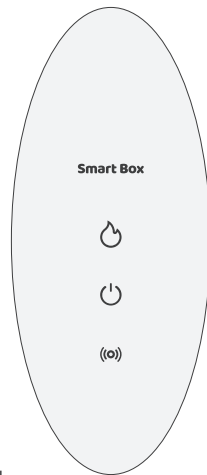

本说明书适用于
聪明盒电动通乳按摩系列
具体型号请参见适用型号列表

使用说明书
Operation Instruction


通乳电动按摩器

全国统一服务热线：400 7189 008


目录

01/ 外观介绍	2
02/ 功能介绍	4
03/ 使用图示	7
04/ 电量管理	7
05/ 维护保养	9
06/ 安全信息	9
07/ 保修卡	13
08/ 用户存根联	14
09/ 经销商存根联	15
10/ 销售员存根联	16

01/外观介绍

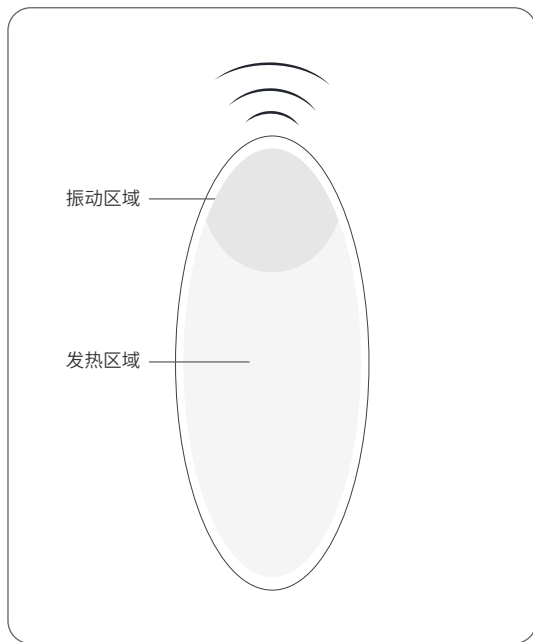

正面

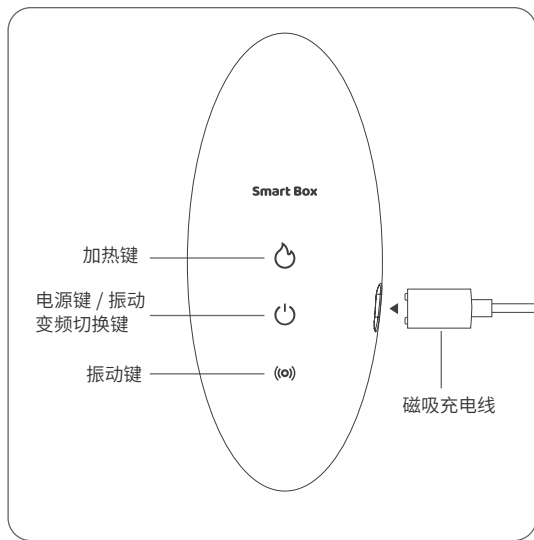


反面

【温馨提醒】

按摩器整机包裹材质采用食品级硅胶的健康环保材质，您可以放心使用。因个体差异原因，如果使用过程感到皮肤不适，请立即停止使用并咨询医生。

02/功能介绍

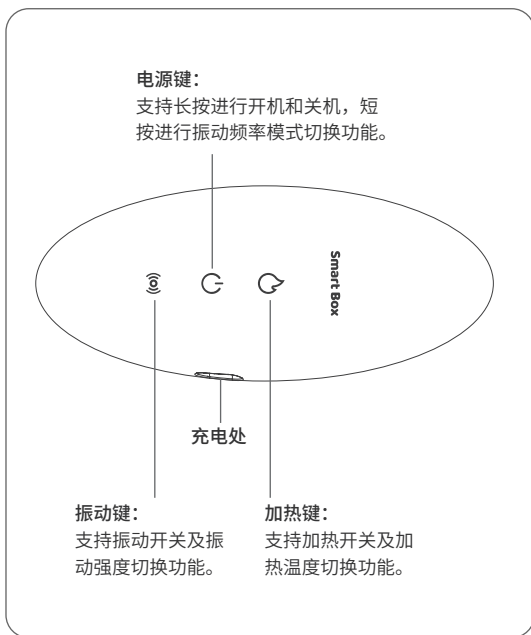

【功能说明与使用图解】

开机 / 关机

开机: 长按电源键 2 秒，直至指示灯长亮，即说明设备处于开机状态。

关机: 长按电源键 2 秒，直至指示灯熄灭，即说明设备处于关机状态。

记忆: 在任何模式下长按电源键 2 秒，直至所有指示灯熄灭即可关闭设备，再次长按电源键 2 秒，直至指示灯亮起，设备会恢复到关闭前所处的模式。

加热功能

按摩器支持三档可调式加热功能，为产后通乳提供更全面的热敷体验，三个加热档温度分别是 42°C、45°C、55°C。

轻按加热键一下，加热键的指示灯亮起，启动第一档加热模式，启动后约 3-5 分钟左右，发热区域开始加热至温度 42°C。

再按加热键一下，加热键的指示灯亮度加大，启动第二档加热模式，启动后约 2-3 分钟左右，发热区域加热至 45°C。

继续按加热键一下，加热键的指示灯亮度最亮，启动第三档加热模式，启动后约 2-3 分钟左右，发热区域加热至 55°C。

最后再按加热键一下，加热键的指示灯熄灭，加热功能关闭。

如果再按加热键一下，就回到第一档加热模式。加热键各项功能按上述顺序依次循环开启 / 关闭。

振动功能

按摩器支持三种频率模式，每种频率模式均有三档强度的可

调式振动功能，为产后通乳提供各全面的按摩体验。三种频率模式包括模式一的持续振动、模式二的脉冲振动、模式三的渗透性振动。在振动键开启的前提下，轻按电源键可以按顺序切换变频振动模式。

轻按振动键一下，振动键的指示灯亮起，启动持续振动模式的第一档振动强度，振动频率每分钟约 4000 转。

再轻按振动键一下，振动键的指示灯亮度加大，启动持续振动模式的第二档振动强度，振动频率每分钟约 5000 转。

继续轻按振动键一下，振动键的指示灯亮度最亮，启动持续振动模式的第一档振动强度，振动频率每分钟约 9000 转。

最后轻按振动键一下，振动键的指示灯熄灭，振动功能关闭。

如果再轻按振动键一下，就回到第一档振动强度。三档振动强度按上述顺序依次循环开启 / 关闭。


在振动按键指示灯亮起的前提下，轻按电源键即可按持续振动模式、脉冲振动模式、渗透振动模式的顺序切换不同的变频振动模式。

保护功能


按摩器在持续工作 20 分钟时，设备将自动关机进入保护模式，自动关机保护模式下，包括电源、加热、振动功能都处于关闭状态，此时设备不存储关机前的模式或状态信息。如再次使用时需重新开机，开机后需重新设置功能或模式。

03/使用图示


【使用示范图】

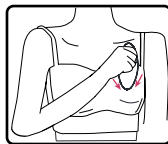

尖端按压

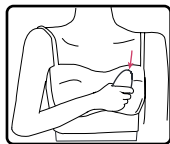

尖端拉刮

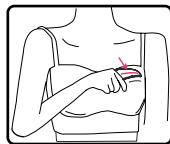

弧面贴合

04/电量管理

首次使用

出厂时，设备的电池已有部分电量。首次使用时，请确保设备在关机状态下进行充电。

亏电状态

当电源键的指示灯变成红色快速闪烁两下时，这是充电提醒，说明电池处于低电状态，需尽快充电。

充电状态

请确保设备处于关机状态下充电，充电时电源键的指示灯变成慢闪烁的稳定状态，说明设备正在正常充电中。

满电状态

当设备充满电时，电源键的指示灯变成长亮的状态，此时电池已充满电，可断开充电连接设备，开机使用。

充电须知

请使用包装内自带的专用充电线充电，充电前请确保充电口、金属触点等干燥和卫生清洁。

请使用额度输出电压为 5V、额定输出电流为 1A(1An) 的合格充电器或者电脑 USB 接口为按摩器充电。使用不合格的充电器，可能出现充电满、发热等多个问题，请谨慎使用。若消费者使用电源适配器充电，则请购买获得 CCC 认证并满足标准要求的电压适配器充电。

充电时请确保按摩器处于关机状态，使用前请确保充电连接处于断开状态。

正常开机使用过程中强行连接充电设备，按摩器将自动关机，切换至充电状态。

为确保消费者拥有更完整的体验，请尽量在电池电量未完全耗尽时提前充电。

05/维护保养

防水防尘

按摩器满足 IPX7 级防水要求，可用于游泳池或海滨游泳等浅水域的水上活动。

不适用于浮潜、热水淋浴、温泉、桑拿（蒸汽室）、跳水、潜水、滑冰、面对高速水流的其它涉水活动及深水活动。

可防如起居室、办公室、实验室、轻工业工作室、仓储室等的灰尘条件，不适合特殊的扬尘环境。

保养清洁

按摩器在使用前，根据个体身体差异不同，可在乳房外涂抹适量的疏通乳膏或其它安全精油（请在医生指导下进行），以提升通乳效果。使用后，可使用专用的软毛绒布擦拭，进行按摩器表面的初步清洁。如果按摩器表面污垢较多，较难清洁，可结合少量清洁剂使用。不得使用磨料清洁剂、稀释剂或苯进行清洗。清洁后，可使用干净、干燥的软毛绒布擦拭，而后置于干净、干燥、防尘环境保存，避免阳光直接照射。

06/安全信息

在使用和操作按摩器前，为确保其性能最佳，并避免出现危险或非法情况，请查阅并遵循所有的安全信息。

版权声明

版权所有 © 厦门初瑶科技有限公司 2022。保留一切权利。

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不限于颜色、大小等）请以实物为准。

未经厦门初瑶科技有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中，可能包含厦门初瑶科技有限公司及其可能存在的许可人享有的知识产权。除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对产品进行复制、修改、解密、反向工厂、出租、转让、分许可等侵犯知识产权的行为，但是适用法律禁止此类限制的除外。

商标声明



Smart Box

聪|明|盒

是厦门初瑶科技有限公司的商标或者注册商标。

注意事项

本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，取决于产品所处的环境因素，包括温度、湿度等。某些特性和功能可能由于环境因素不同而发生轻微变化，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。厦门初瑶科技有限公司保留随

时修改手册中任何信息的权利，无需提前通知且不承认任何责任。

警告

本产品并非玩具，请远离儿童可接触的范围。

在母婴喂养的时候，不得使用本产品。

使用过程中，如发生皮肤或其它不适，请立即停止使用并联系医生咨询或就诊。

在使用前身体有原生疾病或不适症状，请到正规医院咨询并在医疗专业人员指导下谨慎使用。

本产品不可替代医疗器械，不具备有治疗作用。

操作与安全

请在温度 0°C ~35°C 范围内使用本设备，当环境温度过高或者过低时，可能会引起设备故障。

请勿将设备暴露在高温处或其它发热设备的周围，如日照、取暖器、微波炉、烤箱或热水器等。电池过热可能引起爆炸。

设备充电时，电源插座应安装在设备附近并应易于触及，设备应与充电线应处于统一水平位置。

当设备充电完毕或不充电时，请断开充电线与设备的连接并从电源插座上拔掉充电器。

本设备采用硅胶整机包覆，内置锂电池，不可私自拆卸。为保证您的人身安全和保障产品正常运作，强烈建议您和我司客户服务中心联系维护维修。

请按当地规定处理本设备及其附件，不可将它们作为生活垃

圾处理。若处理不当，内置电池可能会导致爆炸危险。

使用未经认可或不兼容的电源、充电器，可能引发火灾、爆炸或其它危险。

只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的配件。如果使用其它类型的配件，可能违反本设备的保修条款以及本设备所处国家的相关规定，并可能导致安全事故。如需获取认可的配件，请与聪明盒客户服务中心联系。

获得更多

您在使用过程中，遇到任何问题可以通过以下途径和方法获得更多帮助信息。

访问 smartbox.com.cn，查阅产品信息、使用帮助、常见问题以及其它信息。

拨打热线：400 7189 008。

扫码以下二维码，了解相关服务政策内容，请关注 Smartbox 聪明盒的官方微信。



服务号

自助服务、智能问答、人工服务
产品服务政策、维修进度
申请及了解相关售后服务



订阅号

获取产品资讯
学习使用技巧
查看更多视频教程

07/保修卡

了解保修期限

非人为的质量问题 7 天退货，15 天包换，1 年质保。

部件名称	保修期限	服务方式
主设备	1 年（含）免费保修	用户寄修
其它附件（配件等）	不予保修	无

寄修须知：1、在聪明盒官网或官方微信填写申请单。

2、根据申请单指引投递产品。

退换货或送修钱，请核对如下资料是否准备齐全。

	主设备与配件齐全	包装完整	发票（未涂改）	赠品（若有）
退货	●	●	●	●
换货	●	●	●	
维修	●		●	

注：退换货或送修前请与聪明盒客户服务中心联系，在客户服务人员的指引下操作。

确认保修状态

- 产品保修起始日期以购置设备发票开具日期为准。
- 若无发票证明，则保修起始日期以主设备的 SN 序列号显示的出厂日期向后顺延 90 日为准。
- 查询产品是否在保修期内，请至聪明盒官网或官方微信公众号输入 SN 序列号查询。

08/用户存根联

用户姓名：	联系电话：
通讯地址：	
产品型号：	序列号（SN）：
购置日期：	发票号码：
购置单位名称：	购置单位电话：
购置单位地址：	

注意：

此三包凭证只适用于上述所列序列号的主设备及附件的三包服务。

请妥善保管此三包凭证，享受三包服务时请主动出示此凭证及相关发票。

此凭证需由销售单位盖章后才能生效。

人为损坏属于非保修范围，具体保修范围请参见服务政策中的规定。

09/经销商存根联

用户姓名：	联系电话：
通讯地址：	
产品型号：	序列号（SN）：
购置日期：	发票号码：
购置单位名称：	购置单位电话：
购置单位地址：	

注意：

此三包凭证只适用于上述所列序列号的主设备及附件的三包服务。

请妥善保管此三包凭证，享受三包服务时请主动出示此凭证及相关发票。

此凭证需由销售单位盖章后才能生效。

人为损坏属于非保修范围，具体保修范围请参见服务政策中的规定。

10/销售员存根联

用户姓名：	联系电话：
通讯地址：	
产品型号：	序列号 (SN)：
购置日期：	发票号码：
购置单位名称：	购置单位电话：
购置单位地址：	

注意：

此三包凭证只适用于上述所列序列号的主设备及附件的三包服务。

请妥善保管此三包凭证，享受三包服务时请主动出示此凭证及相关发票。

此凭证需由销售单位盖章后才能生效。

人为损坏属于非保修范围，具体保修范围请参见服务政策中的规定。